



**Aguja redonda 6 tips  
+ boquilla**

Envejecimiento, cicatrices,  
hiperpigmentaciones

**Aguja lineal 10 tips  
+ boquilla**

Capilar, zonas amplias,  
estrías

**POTENCIA · PRECISIÓN  
EFECTIVIDAD · SEGURIDAD**

## MICROPUNCIÓN

Las agujas **NANOPORE** marcan la diferencia en los tratamientos médicos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Agujas **acero inoxidable** con recubrimiento en titanio
- Método de **esterilización: óxido de etileno**
- Soporte y **tapa de polioximetileno (POM)**:  
(termoplástico cristalino de alta rigidez)
- **Retráctiles**: evitan el daño tisular
- Único uso

### MODO DE USO:

Utilice guantes quirúrgicos, abra la bolsa y coloque la aguja sin quitar la tapa protectora, en el dispositivo Nanopore, enroscándola sin ejercer presión. Retire la tapa protectora de la aguja e inserte la boquilla desechable en la pieza de mano del dispositivo Nanopore.